


#25583.LE
#25583.RI

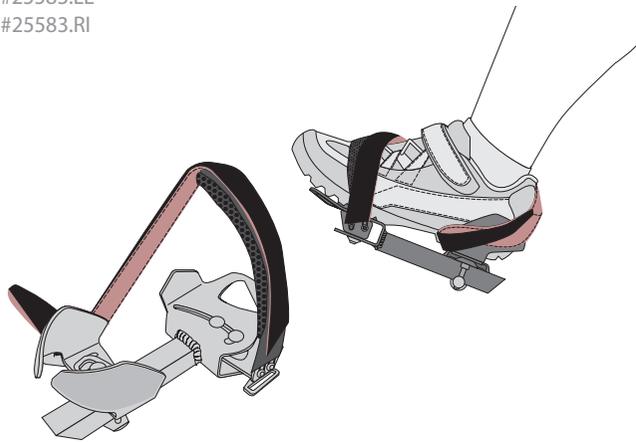

Verwendung

Diese Pedale findet Verwendung bei Fehlstellungen und motorischen Störungen des Fußes.

Indications for use

These pedals are intended for use by riders with foot deformities and/or motor disorders.

Achtung! Caution!


Klären Sie vor Gebrauch mit Ihren Arzt oder Therapeuten ob die Verwendung des Pedals und das Fahrradfahren allgemein Ihre Gesundheit nicht beeinträchtigt. Montagearbeiten und Einstellungen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden, halten Sie Rücksprache mit Ihrem Fachhändler. Die Pedalen dürfen nicht modifiziert werden und dürfen auch nicht die Betriebssicherheit des Fahrrades beeinträchtigen. Die Pedalen dürfen nur bei mehrspurigen Fahrzeugen oder bei dem Stufentandem Pino in der vorderen Position verwendet werden.

Prior to riding with these pedals for the first time, be sure to ask your doctor or physical therapist whether the use of the pedals or cycling in general poses any risks to your health. All installation work and adjustments must be performed by a qualified professional. Consult your authorized dealer. Do not make any modifications to the pedals. The pedals may not be used in any manner that adversely affects the safety of the vehicle. The pedals can only be used for multi-track vehicles (e.g. trikes) or for the front rider of the semi-recumbent tandem Pino.

Spezialpedale anleitung 06/16 DE - EN


**Pedal Justage
Pedal adjustment**

**Größeneinstellung
Size adjustment**

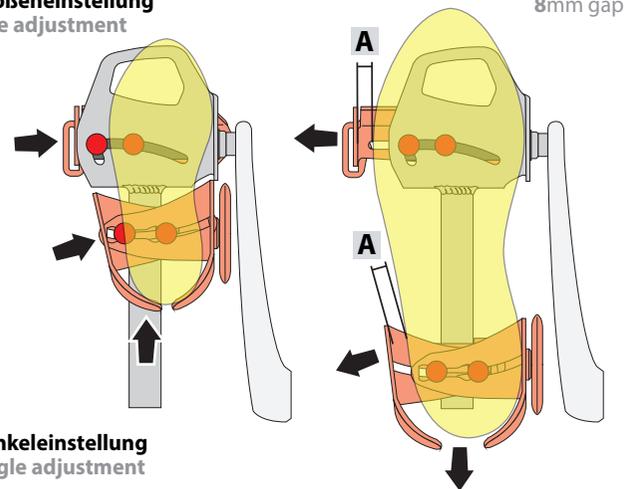

A 8mm Spalt
8mm gap


**Winkleinstellung
Angle adjustment**

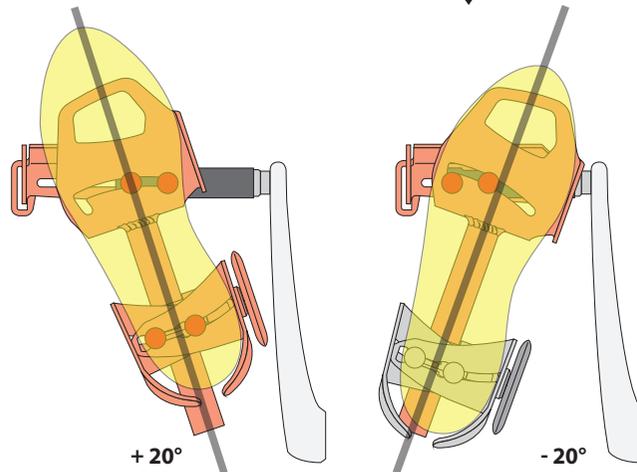

+ 20°


- 20°

**Gurthalter
Strap holder**

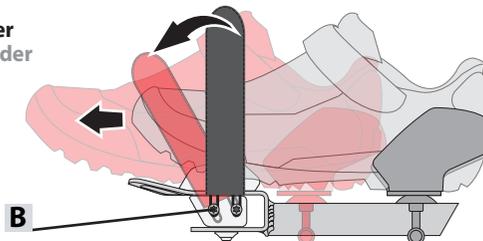


Steht der Fuß weit vorne Schrauben **B** lösen und Riemenhalterung nach vorne verdrehen.
If the foot is positioned far forward on the pedal, loosen the bolts **B** and reposition the strap holder accordingly.


**Befestigungsvarianten
Fastening options**

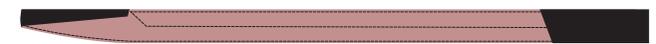

(#25607)

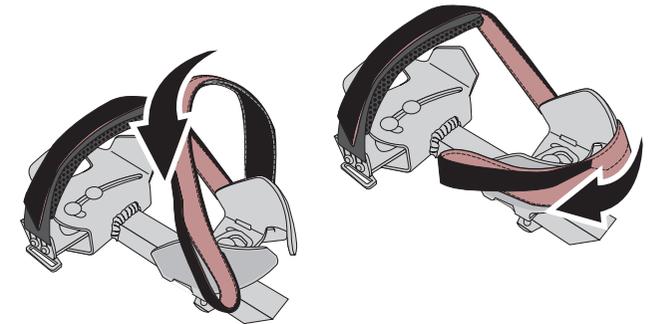


**Riemenlänge verändern
Adjusting the strap length**

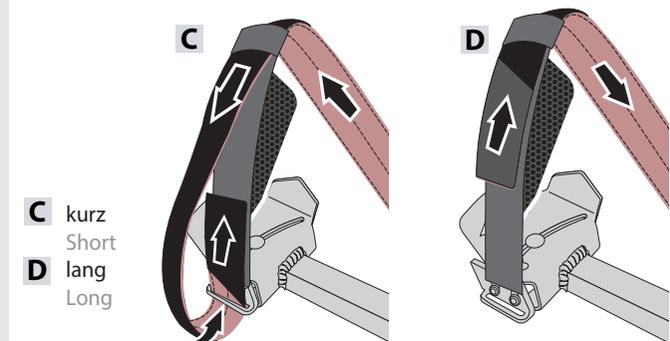

C kurz
Short
D lang
Long

Achtung! Caution!

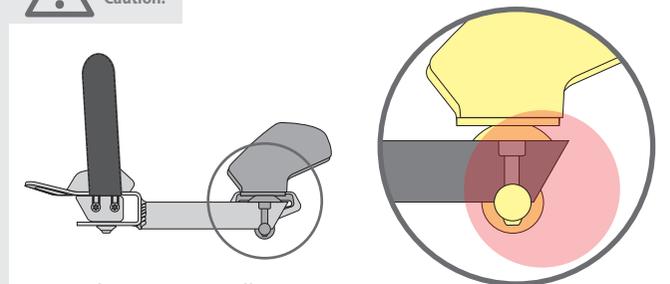

Maximale Längeneinstellung
Maximum length adjustment